


PERFECT HEAD MAXI

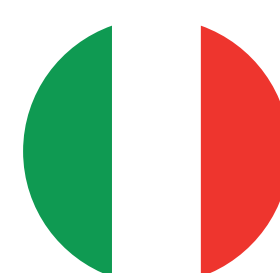

Dispositivo medico
Classe 1



Chi siamo

Koala Babycare nasce agli inizi 2017 da due giovani padri Ingegneri appassionati di Impresa e Innovazione che hanno ideato due cuscini per la prevenzione e la cura della Plagiocefalia: **Koala Perfect Head** e **Koala Perfect Head Maxi**.

I cuscini sono stati progettati in base a un'attenta analisi delle esigenze dei neogenitori e delle soluzioni già presenti sul mercato, con lo scopo di realizzare degli ausili ottimali per la prevenzione e il trattamento della Plagiocefalia. La struttura delle due versioni del **Koala Perfect Head** è stata studiata per accogliere la testa del neonato in modo delicato ma efficace e per essere contemporaneamente antiscivolo, grazie alla configurazione perforata. Questo permette sia al bambino che ai genitori di riposare tranquillamente.

Il design dei cuscini, unico nel suo genere, è stato **brevettato** e ha ottenuto il **marchio CE** come **Dispositivo Medico di Classe I**, a testimonianza del valore delle sue caratteristiche. Anche i materiali di realizzazione sono stati scelti con estrema cura: entrambi i cuscini sono realizzati in **memory foam BASF** di altissima qualità, mentre la federa in cotone risulta traspirante e morbida.

Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un utilizzo pratico, corretto e sicuro del cuscino e dei preziosi consigli per il posizionamento del tuo piccolo.

Se hai qualsiasi dubbio non esitare a contattarci tramite la mail a:

info@koalababycare.com

Sapremo aiutarti e consigliarti con la massima gentilezza e disponibilità!

La Plagiocefalia posizionale

La Plagiocefalia posizionale è una sindrome ancora poco conosciuta, nonostante la sua incidenza sia fortemente aumentata da quando, nel 1992, le linee guida contro la SIDS hanno suggerito di far dormire i neonati supini.

Le ossa del cranio sono connesse tra di loro in modo molto debole nei primi mesi di vita. Per questo motivo, se una pressione viene applicata in modo prolungato sullo stesso punto del cranio, le ossa possono spostarsi. Questo fenomeno è chiamato Plagiocefalia.

Questa situazione può verificarsi, ad esempio, se il vostro bimbo dorme nella stessa posizione tutte le notti e durante i pisolini. La posizione supina, che è la più sicura per la SIDS, se mantenuta per un tempo prolungato può quindi portare ad un appiattimento del cranio.

Conoscere il problema è fondamentale per diagnosticarlo tempestivamente e avviare un intervento correttivo, prevenendo l'aggravarsi della condizione e migliorando il benessere del bambino.

I medici e i pediatri sono il primo punto di riferimento dei neogenitori, per questo è fondamentale che siano ben informati sulla Plagiocefalia e su come poterla trattare in modo non invasivo.

Quando può presentarsi la Plagiocefalia Posizionale?

- Le cause possono essere legate al parto, come per esempio un parto gemellare oppure un bimbo molto grande che si muove poco all'interno del pancione.
- Può presentarsi anche dopo la nascita in seguito al verificarsi di diversi comportamenti, come per esempio un eccessivo mantenimento del neonato per troppe ore nella stessa posizione, oppure quando il bambino preferisce tenere la testolina girata sempre in una direzione sviluppando in questo modo un torcicollo posizionale.

Se dovessi notare una deformazione anche lieve nella testolina del tuo Bimbo parlane immediatamente con il tuo pediatra.

Koala Perfect Head Maxi

Koala Perfect Head Maxi (Taglia L) è utilizzabile dal primo mese fino ai 36 mesi di età. È molto largo (50cm) ed è pensato per l'utilizzo nel lettino.


Crescendo i bimbi inizieranno a muoversi di più durante il sonno (soprattutto durante la notte quando il sonno è prolungato) e Koala Perfect Head Maxi, grazie alla sua dimensione, aiuta a mantenere la testa del bimbo sul cuscino nonostante i movimenti.

Come utilizzo Koala Perfect Head Maxi?

Come consigliato dai pediatri la posizione migliore è quella supina, cioè con il viso rivolto verso l'alto.

Koala Perfect Head Maxi non ha un foro, come il fratello minore Koala Perfect Head, ma una lieve conca al centro. In questo modo il comfort del bambino è assicurato garantendo libertà di spostamento durante il sonno prolungato.

5


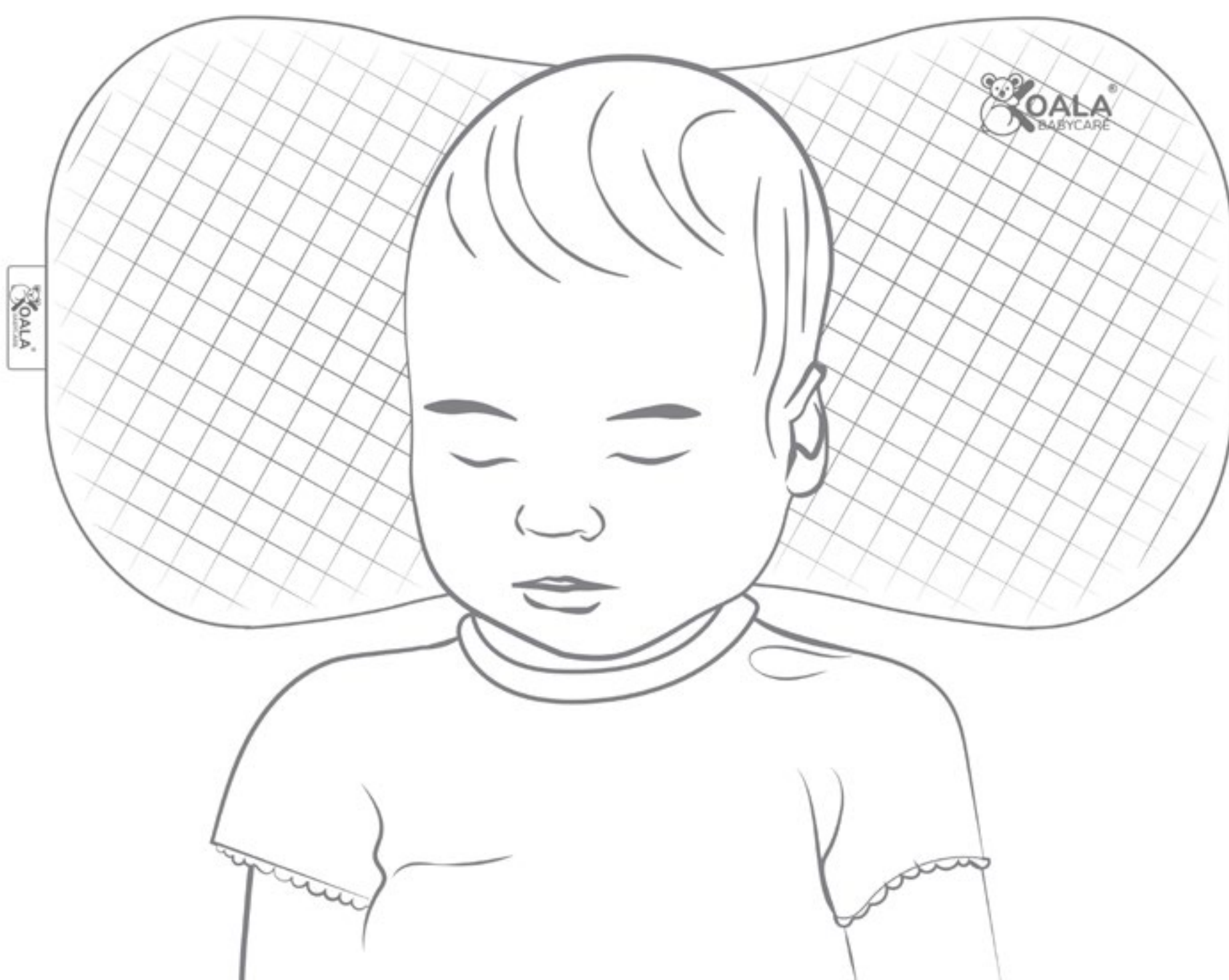


E se il bambino durante il sonno si sposta dalla zona centrale del cuscino, nessun problema! L'altissima qualità del memory foam garantisce una ripartizione ottimale delle pressioni del cranio anche al di fuori della conca.



Le spalle del bimbo non devono appoggiare sul cuscino, questo consente di mantenere la curvatura naturale della schiena e della cervicale e fa in modo che la nuca sia centrata al centro del cuscino.

Se il bambino ha Plagiocefalia laterale, suggeriamo di posizionarlo sul lato opposto a quello colpito dalla Plagiocefalia o di posizionare il bambino rivolto verso l'alto.

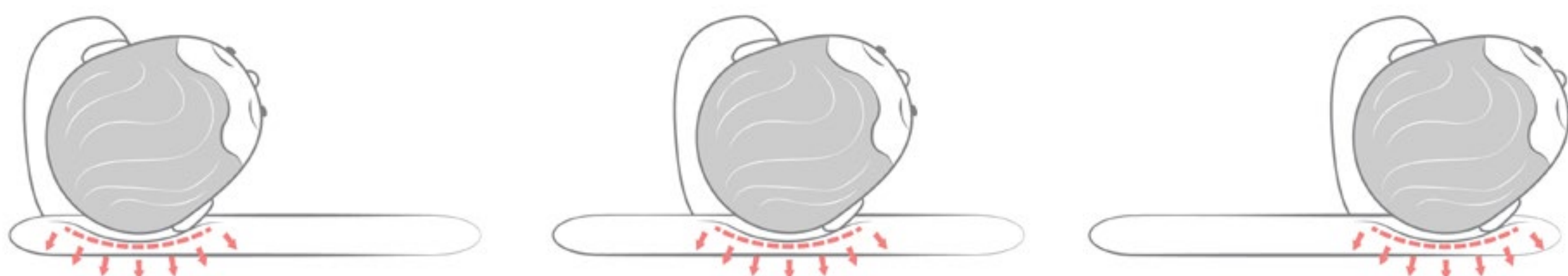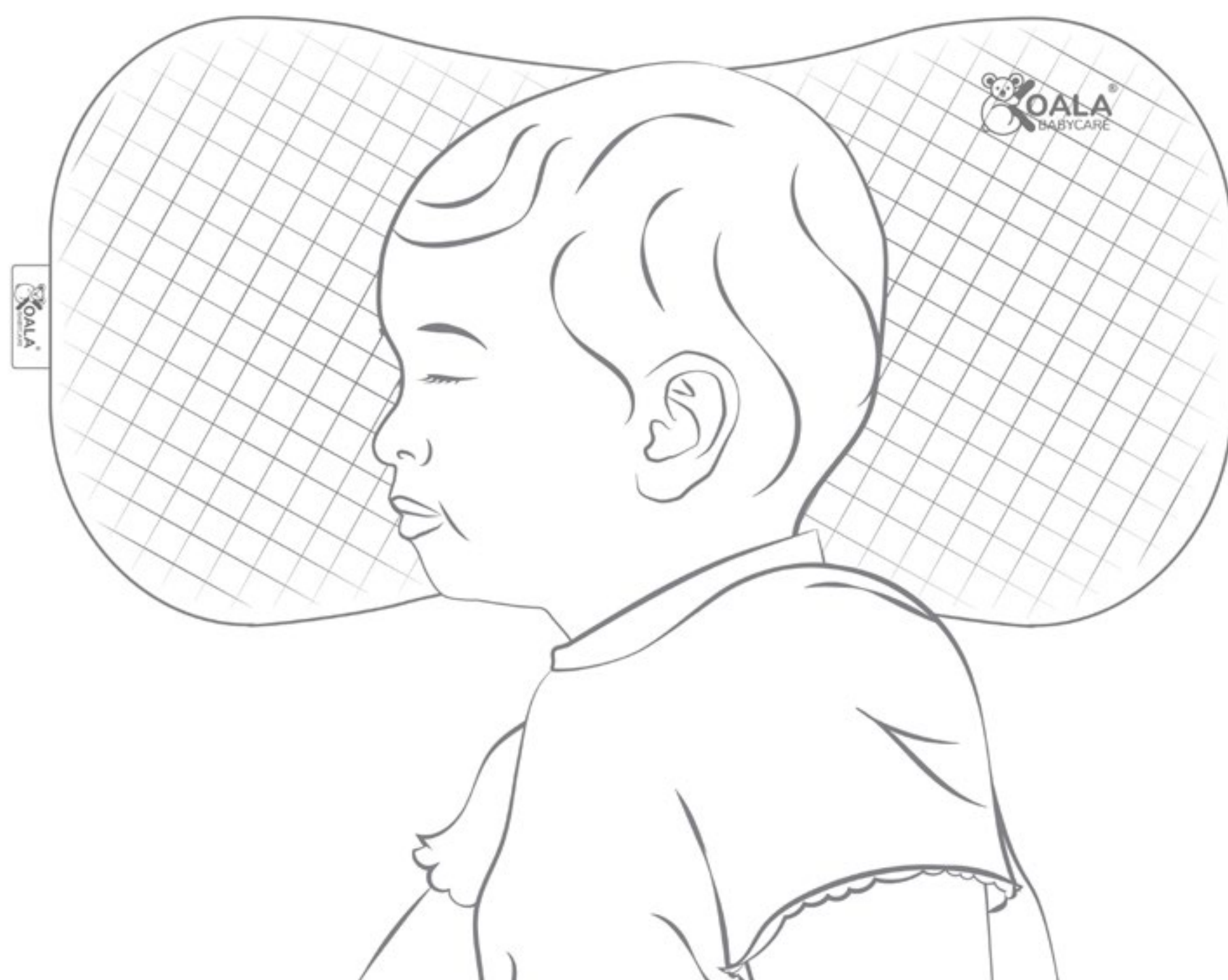

Cos'altro posso fare per combattere la Plagiocefalia posizionale?

Per massimizzare l'efficacia del prodotto, suggeriamo di utilizzare **Koala Perfect Head** abbinato a **Koala Perfect Head Maxi** fin dai primi mesi di vita del neonato. Questo perchè un maggiore tempo di utilizzo garantisce una migliore prevenzione e cura della Plagiocefalia.

Koala Perfect Head Maxi mantiene la struttura pratica, accogliente e antisofofo ma è specificatamente concepito per essere utilizzato nel lettino. La sua larghezza (50 cm) fa sì che la testa del bimbo non scivoli dal cuscino, anche a seguito di movimenti durante il sonno. Grazie allo spessore ridotto nella zona cervicale, si può usare dalla nascita fino ai 36 mesi di età.

Utilizzando entrambi i cuscini durante i diversi momenti della giornata aumenterai drasticamente l'efficacia di prevenire e curare la Plagiocefalia.

Ai nostri cuscini potrai abbinare queste semplici abitudini:

- Quando cambi il tuo piccolo, attira la sua attenzione con un gioco in modo che muova la sua testa a destra e sinistra
- Tieni il bimbo in braccio quando possibile
- Privilegia l'utilizzo di una fascia portà bebe o di un marsupio
- Nella culla e nel box cambia la posizione dei suoi giochi durante il giorno in modo da farlo girare con la testa in posizioni diverse
- Utilizzate un cuscino allattamento, in questo modo il bimbo non effettuerà una pressione diretta sul vostro braccio.
- Il bambino si girerà sempre nella vostra direzione, quindi se il bambino dorme nella vostra stanza alternate la posizione della carrozzina in modo che non si giri sempre dallo stesso lato.
- Se possibile, da sveglio, tenetelo il meno possibile in culle, passeggini e sdraiette!
- Dal 2° mese e solo se sveglio e sorvegliato, posizionatelo ogni tanto a pancia sotto, stimolandolo a tenere la testa dritta.

Come lavare Koala Perfect Head

Mi raccomando **NON LAVARE IL MEMORY FOAM** (il cuscino interno)!

Se immerso in acqua il memory foam la assorbirà perdendo la sua forma e diventando di conseguenza totalmente inutilizzabile.

Qualora volessi lavare il cuscino interno potrai bagnare un panno di cotone in acqua tiepida (eventualmente con l'aggiunta di un goccio di sapone delicato) e pulire le macchie con gesti lievi senza esercitare troppa pressione. Lascialo poi asciugare in una zona molto areata mantenendo sempre la posizione orizzontale, mai appeso.

Ecco alcune indicazioni per il lavaggio delle federe:

- Temperatura massima: 30°C. Se le federe sono particolarmente sporche potrai lavarle anche a 40°. Tuttavia non garantiamo che il cotone resista all'infinito con lavaggi a questa temperatura.
- Non candeggiare.
- Non stirare
- Non pulire a secco, non utilizzare smacchiatori con solventi.

Di cosa è fatto Koala Perfect Head?

- Dimensioni: 50 x 25,5 x 3 cm
- Federa: 75% Cotone, 25% Polyester
- Cuscino: 100% Memory Foam



Grazie Ancora per la Tua Fiducia

Spero questo piccolo manuale ti sia stato utile.

Prima di salutarti vorrei chiederti un piccolo favore: come avrai potuto vedere ci stiamo mettendo il cuore in questo progetto. L'unico modo che abbiamo di far sapere a tutti i neo Papà e neo Mamme quanto impegno ci stiamo mettendo e la bontà del nostro prodotto, sono le recensioni su Amazon.

Non so se ha mai lasciato una recensione prodotto su Amazon, ma ti richiederà solamente 2 minuti. Questi 2 minuti per Me avrebbero un grandissimo significato perché aiuterebbero molte altre persone nella scelta del miglior cuscino per i propri figli.

Seguendo i due punti sotto potrai lasciare una recensione su Amazon.

1. Accedi ad Amazon nella sezione: **“Account” e “I miei Ordini”**.
2. Accanto al tuo acquisto **Koala Babycare** troverai: **“Scrivi una recensione per il prodotto”**

Questi 2 minuti per me avrebbero un grandissimo significato perché aiuterebbero molte altre persone nella scelta del miglior cuscino per i propri figli

Se deciderai di lasciare una recensione te ne sarò infinitamente grato.

Ti auguro tutto il meglio per il tuo Piccolo/a!

Un caro saluto,
Giacomo
Koala Babycare



Registrati alla nostra community, otterrai fino al **20% di sconto** da utilizzare per l'acquisto dei prodotti **Koala Babycare!** Che aspetti?

11

<https://koalababycare.com/perfect-head-community>