


 SILVER  
CUPS

MANUALE UTENTE

---

*Congratulazioni!*

*La gravidanza è un momento  
magico e merita di essere vissuto con  
tutte le comodità possibili!*

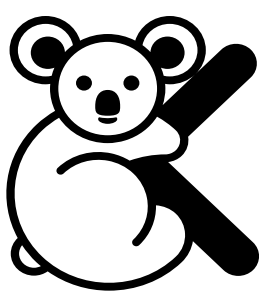

Ciao!

# Ti Presento Koala Babycare!

---

Grazie per averci scelto, Noi di Koala Babycare ci impegniamo quotidianamente per offrire alle Mamme e ai Papà la loro miglior esperienza d'acquisto.



---

**Koala Babycare** nasce agli inizi del 2017 da due giovani ingegneri che hanno voluto fondere insieme Innovazione, Impresa e cura dei bambini.

Dopo il successo del nostro primo prodotto **Koala Perfect Head**, che in questi anni ci ha dato grandi soddisfazioni e ha aiutato moltissime mamme e papà che lottavano contro la Plagiocefalia posizionale, sono arrivati: **Koala Hugs**, il cuscino maternità multifunzione, **Koala Cuddle Band**, la nostra fascia porta bebè ergonomica e **Koala Silver Cups**, i paracapezzoli in argento puro 999.

Questo manuale ti accompagnerà in un utilizzo pratico e sicuro del prodotto, troverai preziosi consigli su come ottenere il massimo dei risultati dai tuoi nuovi paracapezzoli in argento.


Per qualsiasi dubbio o richiesta non esitare a contattarci via mail a:

**[info@koalababycare.com](mailto:info@koalababycare.com)**

Sapremo consigliarti e aiutarti con la massima gentilezza e disponibilità.

Per conoscere sempre nuovi consigli e articoli relativi al mondo dell'infanzia e della genitorialità, visita il nostro sito web:

**[www.koalababycare.com](http://www.koalababycare.com)**

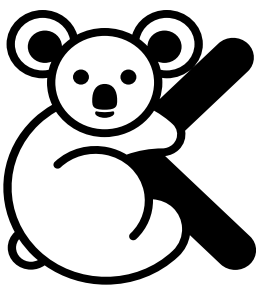

# Che cosa sono le Koala Silver Cups?

---


## Perché abbiamo pensato ai paracapezzoli in argento?

Ogni mamma merita di vivere la propria gravidanza e maternità al meglio e **Koala Babycare** si sta impegnando per trovare delle soluzioni comode ed efficaci a problematiche che possono intaccare la serenità di alcuni momenti, come per esempio: le ragadi al seno durante l'allattamento.

Le ragadi al seno sono delle piccole lesioni che si formano sul capezzolo nel periodo dell'allattamento. Possono essere leggere screpolature o veri e propri tagli associati a leggero sanguinamento e si verificano soprattutto nelle neomamme al primo figlio.

Grazie a **Koala Silver Cups**, le coppette in **argento 999**, potrai prevenire e curare questo disturbo, proteggendo il seno da agenti esterni e batteri e alleviando il dolore già nelle prime 24/48 ore.



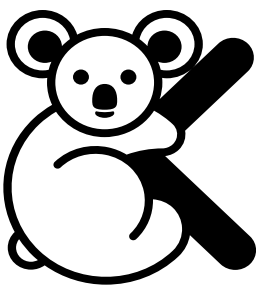

# Perchè utilizzare Koala Silver Cups

---

- Le Koala Silver Cups sono realizzate in argento 999 e prive di nichel, non rilasciano quindi sostanze nocive per il piccolo e non alterano il sapore del latte.
- La loro forma aderisce perfettamente al seno proteggendolo da eventuali sfregamenti con indumenti o agenti esterni.
- Sono sottili e discrete, nessuno si accorgerà che le indossate!
- Una scelta ecologica ed economica. Una volta acquistate le coppette, se conservate in modo idoneo, potranno essere utilizzate dalla stessa mamma anche per future gravidanze, evitando l'acquisto di altri prodotti come creme o paracapezzoli monouso che creano montagne di rifiuti.

## Proprietà dell'argento?


### Perché proprio l'argento?

Sapevi che è uno dei maggiori alleati naturali per i problemi cutanei da secoli?

Infatti già le nostre nonne utilizzavano dei cucchiaini in argento sui capezzoli per contrastare il dolore dovuto alle ragadi al seno. Fortunatamente nel corso degli anni sono stati studiati i paracapezzoli che oltre a curare, riescono a prevenire questo disturbo.

### In che modo agisce?

L'argento a contatto con l'umidità sprigiona tutte le sue proprietà cicatrizzanti, antibatteriche e disinfettanti. In questo modo la pelle ha modo di cicatrizzarsi e autocurarsi, evitando l'uso di prodotti e creme.

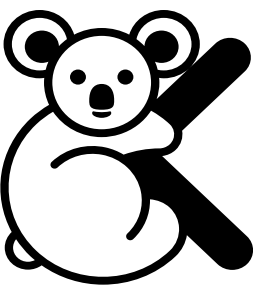

# Come usare Koala Silver Cups


---

## Prima dell'utilizzo leggi queste avvertenze:

- Se sei a conoscenza di eventuali allergie specifiche all'argento o dovessero presentarsi manifestazioni allergiche, sospenderne immediatamente l'utilizzo.
- Utilizzare solo ed esclusivamente sull'area intorno al capezzolo.
- Rispettare le seguenti indicazioni di utilizzo, di lavaggio e di conservazione. Un utilizzo o una conservazione non idonea potrebbe compromettere le proprietà del prodotto.
- Il prodotto non contiene NICKEL.

## Ora puoi iniziare a utilizzarle:

- Al primo utilizzo lava le coppette con acqua tiepida e sapone neutro e inodore poi risciacquale e asciugale con un panno pulito. Ripeti questi passaggi dopo ogni utilizzo.
- Inserisci le coppette tra il seno e il reggiseno appoggiandole ai capezzoli.
- Al momento dell'allattamento rimuovi le coppette delicatamente e sciacqua il seno con dell'acqua tiepida.
- Al termine dell'allattamento applica una goccia di latte o acqua all'interno della coppetta in modo che possa aderire perfettamente al seno.

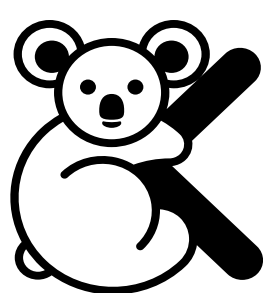

# Come lavare e conservare Koala Silver Cups

---

Le proprietà disinfettanti dell'argento fanno sì che le sue istruzioni di lavaggio non richiedono tanti prodotti o sforzi, infatti ti basterà sciacquarli in acqua tiepida (se vorrai potrai utilizzare un goccio di sapone neutro) dopo ogni utilizzo e asciugarli con un panno in cotone.

Ogni tanto potrai immergere le coppette dentro una ciotola con acqua calda e bicarbonato di sodio (50 gr ogni Litro) e lasciare in ammollo per un po'.

Se nel corso del tempo dovesse presentarsi un annerimento dell'argento non preoccuparti, potrai lavarlo con bicarbonato come spiegato sopra.


Se la macchia non dovesse andare via, non esitare a contattarci alla mail: [info@koalababycare.com](mailto:info@koalababycare.com)

## Conservazione:

Dopo averlo appositamente lavato, riporlo nella sua confezione originale, all'interno della sua scatola. Tenere la confezione in un luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da fonti di calore o da raggi solari.

Consigliamo di conservare tutta la confezione durante l'utilizzo, in caso si fosse persa o buttata potete conservare le vostre coppette all'interno di un panno pulito per evitare il contatto con l'aria e l'esposizione alla luce che ne provocano l'ossidazione.

Se per la conservazione del dispositivo si sono seguite tutte le linee guida il prodotto non ha data di scadenza.

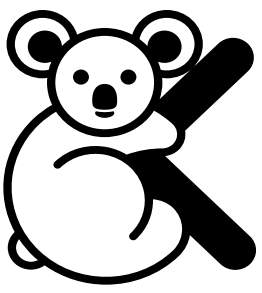

# Koala Babycare consiglia

---

- Inizia a usare le coppette **Koala Silver Cups** da 7-10 giorni prima del parto come prevenzione.
- Ricordati di lavare sempre le coppette e asciugarle con un panno asciutto per evitare l'ossidazione dell'argento (annerimento).
- Se dovesse fuoriuscire una quantità abbondante di latte, usa delle coppette assorbilatte tra **Koala Silver Cups** e il reggiseno.
- Un elemento fondamentale di prevenzione delle ragadi è il posizionamento corretto del bambino durante la poppata, che deve portarlo a succhiare il capezzolo a ventosa tenendo in bocca non solo la punta ma anche l'areola.
- Se le ragadi sono già molto dolorose, è bene attaccare il bambino prima al seno meno dolorante in modo che sfoghi la sua voracità su quello e che la poppata sull'altro risulti più dolce.
- Alla fine di ogni poppata, massaggia capezzolo e areola con qualche goccia del tuo latte: le sue sostanze benefiche idratano la pelle e aiutano la cicatrizzazione.
- Quando sei in casa lascia il più possibile il seno scoperto in modo che possa prendere aria e aiutando la pelle a stare meglio.



## Grazie Ancora per la Tua Fiducia

Spero questo piccolo manuale ti sia stato utile. Prima di salutarti vorrei chiederti un piccolo favore: come avrai potuto vedere ci stiamo mettendo il cuore in questo progetto.

L'unico modo che abbiamo di far sapere a tutti i neo Papà e neo Mamme quanto impegno ci stiamo mettendo e la bontà del nostro prodotto, sono le **recensioni su Amazon**.

Non so se ha mai lasciato una recensione prodotto su Amazon, ma ti richiederà solamente 2 minuti.

Questi 2 minuti per Me avrebbero un grandissimo significato e inoltre aiuterebbero molte persone nella scelta del miglior prodotto per sè e per i propri bambini.

Seguendo i due punti sotto potrai lasciare una recensione su Amazon.

- 1) Accedi ad Amazon nella sezione: **“Account”** e **“I miei Ordini”**.
- 2) Accanto al tuo acquisto **Koala Babycare** troverai: **“Scrivi una recensione per il prodotto”**

**Se deciderai di lasciare una recensione te ne sarò infinitamente grato.**

Ti auguro tutto il meglio per il tuo Piccolo/a!

Un caro saluto,  
Giacomo Koala Babycare

