

# PERFECT HEAD MAXI



Dispositivo medico  
Classe 1



# Wer sind wir

**Koala Babycare** wurde Anfang 2017 von zwei jungen Vätern und Ingenieuren, dank deren Geschäftssinn und Leidenschaft für Innovation gegründet. Sie verwirklichteten die Idee, zwei Kissen zur Vorbeugung und Behandlung von Plagiozephalie zu entwerfen: **Koala Perfect Head** und **Koala Perfect Head Maxi**.

Die Kissen wurden auf der Grundlage von sorgfältigen Analysen über die Bedürfnisse frischgebackener Eltern und den bereits auf dem Markt befindlichen Produkten entwickelt, mit dem Ziel, ein optimales Hilfsmittel zur Vorbeugung und Behandlung von Plagiozephalie zu schaffen. Die Struktur der beiden Versionen der **Koala Perfect Head** wurde so entworfen, dass sie den Kopf des Babys auf sanfte, aber effektive Weise platzieren und gleichzeitig dank der perforierten Konfiguration gleichzeitig gegen Ersticken wirken. Dies ermöglicht sowohl dem Kind als auch den Eltern, sich friedlich auszuruhen.

Das einzigartige Design der Kissen wurde patentiert und erhielt das **CE-Zeichen** als **Medizinprodukt der Klasse I**, was den Wert seiner Eigenschaften widerspiegelt. Auch die Materialien wurden mit äußerster Sorgfalt ausgewählt: Beide Kissen bestehen aus hochwertigem **BASF-Memory-Schaum**, während der Baumwollkissenbezug atmungsaktiv und weich ist.

2

Dieses **Handbuch** enthält einige kleine Vorschläge für einen praktischen, korrekten und sicheren Gebrauch der Kissen sowie wertvolle Tipps zur Positionierung Ihres Babys.

Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, zögern Sie nicht, uns via E-Mail zu kontaktieren:

**[info@koalababycare.com](mailto:info@koalababycare.com)**

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung bei Fragen oder Problemen!

# Positionsbedingte Plagiozephalie

Die Positionsbedingte Plagiozephalie ist ein noch wenig bekanntes Syndrom, obwohl ihre Häufigkeit stark zugenommen hat, seit 1992 eine Richtlinien gegen SIDS (plötzlicher Kindstod) herausgegeben wurde, dass Neugeborene auf dem Rücken schlafen sollten.

Die Schädelknochen sind in den ersten Lebensmonaten sehr schwach miteinander verbunden. Aus diesem Grund können sich die Knochen bewegen, wenn ein längerer Druck auf dieselbe Stelle des Schädels ausgeübt wird. Dieses Phänomen nennt man Plagiozephalie.

Diese Situation kann beispielsweise auftreten, wenn Ihr Baby jede Nacht und während des Nickerchens in derselben Position schläft. Die Rückenlage, die für SIDS am sichersten ist wenn sie über einen längeren Zeitraum beibehalten wird, kann daher zu einer Abflachung des Schädels führen.

Es ist wichtig, dieses Problem zu kennen, um es schnell zu diagnostizieren und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sich der Zustand verschlechtert, und um das Wohlbefinden des Kindes zu verbessern.

Ärzte und Kinderärzte sind die erste Anlaufstelle für Eltern. Daher ist es wichtig, dass Sie über die Plagiozephalie und deren Behandlung gut informiert sind.

# Wann kann Positionsbedingte Plagiozephalie auftreten?

- Die Ursachen können im **Zusammenhang mit der Geburt** stehen, z. B. einer Zwillingsgeburt oder einem sehr großen Baby, das sich wenig im Bauch bewegt.
- Sie kann auch nach der Geburt auftreten, bei folgenden Verhaltensweisen, z. B. wenn das Neugeborenen für zu viele Stunden in derselben Position ist oder wenn das Kind den Kopf immer in eine Richtung gedreht lassen möchte, wodurch ein steifer Nacken entstehen kann.

Wenn Sie eine leichte Verformung am Kopf Ihres Babys bemerken, wenden Sie sich sofort an Ihren Kinderarzt.



# Koala Perfect Head Maxi

**Koala Perfect Head Maxi** (Größe L) kann ab dem ersten Monat bis 36 Monaten verwendet werden. Es ist sehr breit (50 cm) und für die Verwendung im Kinderbett entwickelt. Wachsende Babys beginnen sich während des Schlafs vermehrt zu bewegen (besonders Nachts, wenn der Schlaf länger dauert) und **Koala Perfect Head Maxi** hilft dank seiner Größe, den Kopf des Babys trotz der Bewegungen auf dem Kissen zu halten.

## How do I use Koala Perfect Head Maxi?


Wie von Kinderärzten empfohlen, ist die beste Position die Rückenlage, d.h. mit dem Gesicht nach oben.

**Koala Perfect Head Maxi** hat kein Loch wie der jüngere Bruder **Koala Perfect Head**, sondern eine kleine Vertiefung in der Mitte. Auf diese Weise wird der Komfort des Kindes gewährleistet und die Bewegungsfreiheit bei längerem Schlaf garantiert.

5





Wenn sich das Baby im Schlaf aus dem zentralen Bereich des Kissens bewegt, ist das kein Problem. Die hohe Qualität des Memory-Schaums garantiert eine optimale Druckverteilung des Schädels auch außerhalb der Vertiefung.

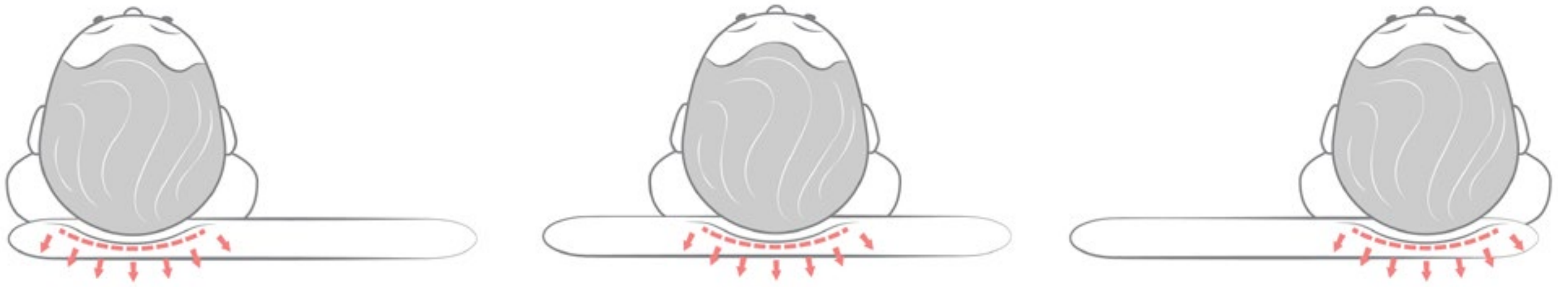

Die Schultern des Kindes sollten nicht auf dem Kissen liegen, um die Beibehaltung der natürlichen Krümmung des Rückens und des Halses sicher zu stellen und der Nacken sollte in der Mitte des Kissens zentriert sein.

Wenn das Kind eine laterale Plagiozephalie hat, empfehlen wir, es auf die gegenüberliegende der betroffenen Seite zu legen oder das Kind mit dem Gesicht nach oben zu positionieren.

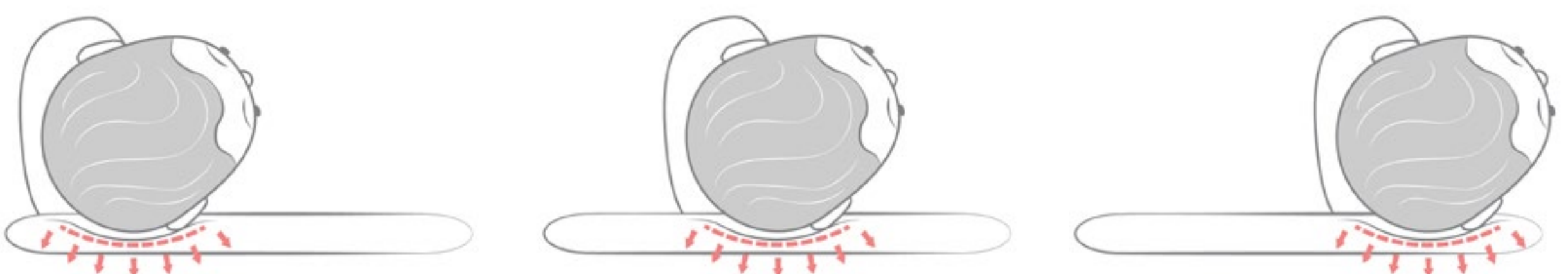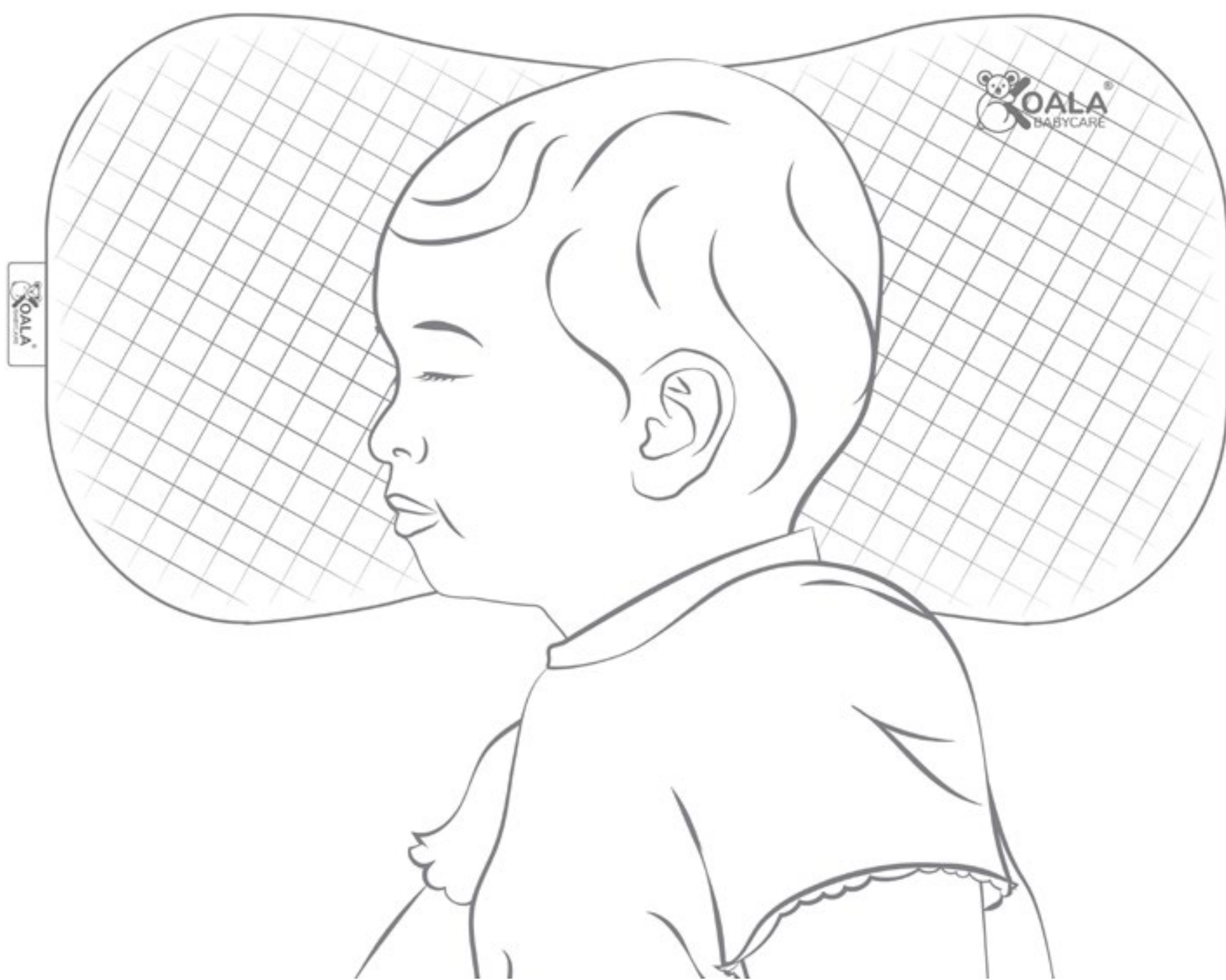



# Was kann man noch tun, um die positionsbedingte Plagiozephalie zu bekämpfen?

Um die Wirksamkeit des Produkts zu maximieren, empfehlen wir die Verwendung von **Koala Perfect Head** in Kombination mit **Koala Perfect Head Maxi** ab den ersten Lebensmonaten des Babys. Dies liegt daran, dass eine längere Anwendungsdauer eine bessere Vorbeugung und Behandlung der Plagiozephalie gewährleistet.

**Koala Perfect Head Maxi** behält die praktische Struktur bei, gemütlich und gegen Erstickung, wurde es speziell für die Verwendung im Kinderbett entwickelt. Durch seine Breite (50 cm) rutscht der Kopf des Babys auch bei Bewegungen im Schlaf nicht vom Kissen. Dank der geringeren Dicke im Halsbereich kann es von der Geburt an bis zum Alter von 36 Monaten verwendet werden.

Die Verwendung beider Kissen in den unterschiedlichsten Momenten erhöht die Wirksamkeit der Vorbeugung und Behandlung von Plagiozephalie erheblich.

# **Sie können diese einfachen Gewohnheiten mit unseren Kissen kombinieren:**

- Wenn Sie Ihr Baby wickeln, lenken Sie seine Aufmerksamkeit auf ein Spiel, so dass es seinen Kopf nach links und rechts bewegt
- Halten Sie das Baby wann immer möglich in Ihren Armen
- Verwenden Sie ein Babytragetuch oder eine Babytrage
- In der Wiege und im Laufgitter ändern Sie stets die Position seiner Spiele, so dass es seinen Kopf in verschiedene Richtungen dreht
- Verwenden Sie ein Stillkissen, damit der Druck nicht direkt auf Ihrem Arm ist.
- Das Kind dreht sich immer in Ihre Richtung? Wenn das Kind in Ihrem Zimmer schläft, ändern Sie die Position der Schlafgelegenheit, damit es sich nicht immer auf die gleichen Seite dreht.
- Lassen Sie es im Wachzustand so wenig wie möglich in der Wiege, Kinderwagen und Babywippe.
- Ab dem 2. Monat platzieren Sie es im Wachzustand gelegentlich und beaufsichtigt auf dem Bauch und ermutigen Sie es, den Kopf gerade zu halten.



# Wie man das Koala Perfect Head wäscht

Der Memory Foam (das Innenkissen) **DARF NICHT GEWASCHEN WERDEN!**

Im Wasser eingetaucht, verliert der Memory-Schaum seine Form und wird völlig **unbrauchbar**.

Wenn Sie das Innenkissen reinigen möchten, können Sie ein Baumwolltuch in warmem Wasser (eventuell mit einem Tropfen milder Seife) anfeuchten und die Flecken mit leichten Bewegungen ohne zu viel Druck auszuüben reinigen. Lassen Sie es dann an einem sehr belüfteten Ort trocknen, stets horizontal, **niemals aufhängen**.

Anweisungen zum Waschen der Kissenbezüge:

- Maximale Temperatur: 30 °, wenn die Kissenbezüge besonders schmutzig sind, können Sie sie auch bei
- 40 ° waschen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die Baumwolle bei mehrmaligem Waschen bei dieser Temperatur intakt bleibt.
- Nicht bleichen
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen, keine Fleckentferner mit Lösungsmitteln verwenden.

# Woraus besteht das Koala Perfect Head Maxi?

- Abmessungen: 50 x 25,5 x 3
- Bezug: 75% Baumwolle, 25% Polyester
- Kissen: 100% Memory-Schaum



# Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte

Ich hoffe, dieses kleine Handbuch hat Ihnen geholfen.

Bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen einen kleinen Gefallen anfragen: Wie können Sie sehen, dass wir unser Herz in dieses Projekt stecken. Der einzige Weg, wie wir alle neuen Mütter und Väter über die Verpflichtung informieren können, die wir in unsere Arbeit und die Qualität unseres Produkts stecken, sind die Kommentare zu Amazon.

Ich weiß nicht, ob Sie bereits einen Kommentar bei Amazon hinterlassen haben, aber es dauert nur zwei Minuten. Diese zwei Minuten wären für mich von großer Bedeutung, weil sie vielen anderen Menschen bei der Wahl des besten Kopfkissens für diese Kinder helfen würden.

Unter den folgenden zwei Punkten können Sie eine Rezension bei Amazon hinterlassen.

- 1) Greifen Sie im Bereich **“Mein Konto”** und **“Meine Bestellungen”** auf Amazon zu.
- 2) Neben Ihnen **Koala Babycare** Kauf finden Sie: **“Schreibe eine Produkterezension”**.

11

**Diese zwei Minuten wären für mich von grosser bedeutung, weil sie vielen anderen Menschen bei der wahl des besten Kopfkissens für diese Kinder helfen würden.**

Wenn Sie sich entscheiden, einen Kommentar abzugeben, werde ich Ihnen sehr dankbar sein.

**Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Kind!**

**Giacomo,  
Koala Babycare**





Melde dich zu unserer **Community** an und erhalte einen **20% Rabatt** für den Kauf von **Koala Babycare Produkten!**  
Worauf wartest du noch?!

<https://koalababycare.com/perfect-head-community>