


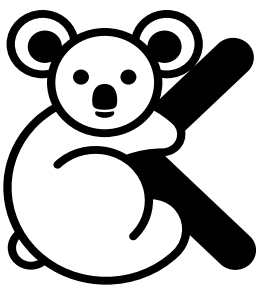

DAS BENUTZER-HANDBÜCHER

*Herzlichen Glückwunsch!
Die Schwangerschaft ist ein
magischer Moment und
verdientes, mit allen möglichen
Annehmlichkeiten erlebt zu werden!*



Hallo! Ich werde Sie Koala Babycare vorstellen!

Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben, Wir bei Koala Babycare verpflichten uns jeden Tag, Müttern und Vätern das beste Einkaufserlebnis zu bieten.



Koala Babycare wurde Anfang 2017 von zwei jungen Ingenieuren gegründet, die Innovation, Business und Kinderbetreuung miteinander verbinden wollten.

Nach dem Erfolg unseres ersten Produkts **Koala Perfect Head**, das in den letzten Jahren sehr erfolgreich war und vielen Müttern und Vätern geholfen hat, die gegen die Positionsbedingte Plagiozephalie kämpften, kam nach monatelangen Studien das multifunktionale Stillkissen **Koala Hugs** und in Folge das **Koala Cuddle Band**, unserer Babytragetuch und die **Koala Silver Cups**, die Stillhütchen aus 999 reinem Silber, auf den Markt.

Dieses Handbuch begleitet Sie für eine praktische und sichere Anwendung des Produkts. Sie finden wertvolle Tipps, wie Sie mit Ihren neuen Stillhütchen die besten Ergebnisse erzielen.


Für Fragen oder Zweifel, zögern Sie bitte nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren unter:

info@koalababycare.com

Wir können Sie beraten und Ihnen mit äußerster Freundlichkeit und Verfügbarkeit helfen.

Um immer neue Tipps und Artikel rund um die Welt der Kindheit und Erziehung zu erfahren, besuchen Sie unsere Website:

www.koalababycare.com

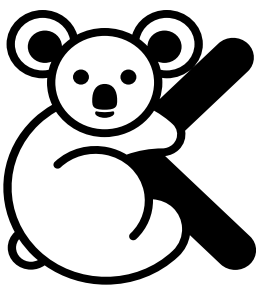

Was sind Koala Silver Cups?


Warum haben wir die Stillhütchen in Silber gemacht?

Jede Mutter hat es verdient, ihre Schwangerschaft und Mutterschaft in vollen Zügen zu genießen und **Koala Babycare** arbeitet daran, komfortable und wirksame Lösungen für Probleme zu finden, die die Gelassenheit einiger Momente beeinträchtigen können, wie z. B. :
Brustrisse während des Stillens.

Brustrisse sind kleine Läsionen, die sich während des Stillens an der Brustwarze bilden. Sie können leichte Risse oder echte Schnitte sein, die mit leichten Blutungen verbunden sind, und treten insbesondere bei Müttern mit ihrem ersten Kind auf.

Dank **Koala Silver Cups**, den Stillhütchen aus reinem **999 Silber**, können Sie dieser Störung vorbeugen und sie behandeln, indem Sie die Brust vor äußeren Einflüssen und Bakterien schützen und die Schmerzen in den ersten 24/48 Stunden lindern.



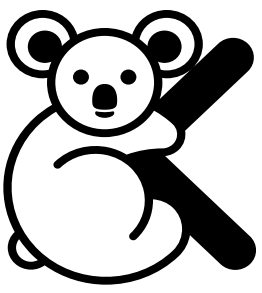

Warum Koala Silver Cups Verwenden?

- Die **Koala Silver Cups** bestehen aus **999er Silber** und sind nickelfrei. Sie setzen daher keine für das Baby schädlichen Substanzen frei und verändern den Geschmack der Milch nicht.
- Ihre Form passt sich perfekt an die Brust an und schützt sie vor möglichen Reibungen durch Kleidung oder äußeren Einflüssen.
- Sie sind dünn und diskret, niemand wird bemerken, dass Sie sie tragen!
- Eine ökologische und ökonomische Wahl. Einmal gekaufte Stillhütchen können bei sachgemäßer Lagerung auch für zukünftige Schwangerschaften verwendet werden, ohne dass andere Produkte wie Cremes oder Einweg Stillhütchen gekauft werden müssen, die Berge von Abfällen verursachen.


Eigenschaften von Silber

Warum genau Silber?

Wussten Sie, dass es seit Jahrhunderten einer der wichtigsten und natürlichsten Verbündeten bei Hautproblemen ist? Tatsächlich verwendeten unsere Großmütter bereits Silberlöffel an ihren Brustwarzen, um die durch Brusttrissen verursachten Schmerzen entgegenzuwirken. Glücklicherweise wurden im Laufe der Jahre die Brustwarzen untersucht, um zusätzlich zur Heilung diese Störung zu verhindern.

Wie funktioniert es

In Kontakt mit Feuchtigkeit setzt Silber all seine heilenden, antibakteriellen und desinfizierenden Eigenschaften frei. Auf diese Weise ist die Haut in der Lage sich selbst zu heilen, ohne weitere Produkte und Cremes zu verwenden.

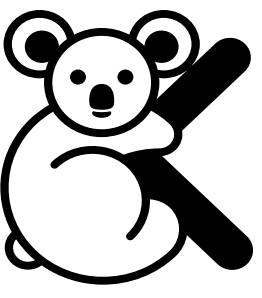


Wie sind Koala Silver Cups anzuwenden?

Lesen Sie diese Hinweise vor dem Gebrauch:

- Solltest du an einer speziellen Silberallergie leiden oder eine allergische Reaktion im Gebrauch bemerken, stoppe die Nutzung der Koala Silver Cups sofort.
- Nutze die Cups ausschließlich für die Brustwarzen.
- Achte auf die folgenden Hinweise zur Nutzung, Waschen und Aufbewahrung. Unsachgemäße Nutzung kann die Qualität und Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen!
- Produkt enthält kein NICKEL.

Jetzt können Sie sie verwenden:

- Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, die Cups mit lauwarmen Wasser und einer neutralen, parfümfreien Seife zu waschen und anschließend unbedingt mit einem sauberen Tuch zu trocknen. Wiederhole diesen Reinigungsvorgang nach jeder Nutzung.
- Platziere die Cups zwischen Brust und BH, auf den Brustwarzen.
- Entferne die Cups vorsichtig vor dem Stillen und wasche die Brüste mit lauwarmem Wasser.
- Befeuchte die Cups nach dem Stillen mit einem Tropfen Wasser oder Milch, so haften sie gut an der Brust.

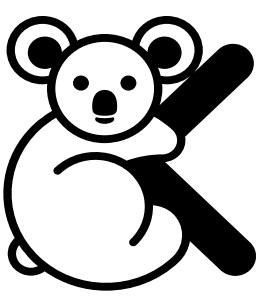

Wie sind Koala Silver Cups zu reinigen und aufzubewahren?

Die desinfizierenden Eigenschaften von Silber bedeuten, dass die Reinigung nicht viele Produkte oder Anstrengungen erfordern. Sie müssen sie lediglich nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser abspülen (wenn Sie möchten, können Sie einen Tropfen neutrale Seife verwenden) und mit einem Baumwolltuch trocknen.

Von Zeit zu Zeit können Sie die Stillhütchen in eine Schüssel mit heißem Wasser und Bikarbonat (50 Gramm pro Liter) tauchen und eine Weile einwirken lassen.

Wenn es im Laufe der Zeit zu einer Schwärzung des Silbers kommen sollte, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können sie wie oben beschrieben mit Bikarbonat waschen.


Wenn die Verfärbungen nicht verschwinden, zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren: info@koalababycare.com

Lagerung:

Zur Aufbewahrung bitten wir dich, die Cups nach dem Waschen zurück in ihre Originalverpackung zu legen, in der mitgelieferten Box. Bewahre diese Box an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort auf, der frei von direkter Sonneinstrahlung und Hitze ist.

Wir empfehlen dir, die gesamte Verpackung zu behalten. Solltest du die Verpackung bereits entsorgt, oder verloren haben, kannst du die Cups in einem sauberen Tuch aufbewahren, um Luftkontakt und direktes Licht zu vermeiden; beides kann zu Oxidation führen.

Mindesthaltbarkeitsdatum: Wenn alle Gebrauchshinweise zur Erhaltung der Cups befolgt werden, hat das Produkt kein Ablaufdatum.

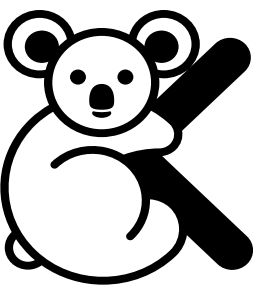

Koala Babycare empfiehlt

- Beginne mit der Nutzung der **Koala Silver Cups** Tage vor dem Geburtstermin als vorbeugende Maßnahme.
- Denke daran, die Cups immer zu säubern und danach mit einem trockenen Tuch zu trocknen, um die Oxidation des Silbers zu vermeiden (Verfärbung).
- Sollte sehr viel Milcheinschuss da sein, empfehlen wir die Nutzung der absorbierenden Cups zwischen Koala Silver Cups und dem BH.
- Ein grundlegendes Element zur Verhinderung von Brusttrissen ist die richtige Positionierung des Babys während des Stillens. Wichtig, dass es die Brustwarze nicht nur an der Spitze saugt, sondern auch den Warzenhof im Mund hält.
- Wenn die Brusttrisse bereits sehr schmerzhaft sind, ist es gut, das Kind zuerst an die weniger schmerzhaftere Brust zu legen, damit es seinen Heisshunger stillt und die Fütterung auf der anderen Seite angenehmer wird.
- Massieren Sie am Ende jeder Fütterung die Brustwarze und den Warzenhof mit ein paar Tropfen Ihrer Milch. Die wohltuenden Substanzen spenden Feuchtigkeit und helfen bei der Heilung.
- Wenn Sie zu Hause sind, lassen Sie die Brust so weit wie möglich unbedeckt, damit sie Luft bekommt und die Haut sich besser fühlt.

Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen

Ich hoffe, dieses kleine Handbuch hat Sie geholfen.

Bevor ich mich verabschiede, möchte ich Ihnen einen Gefallen fragen: Wie Sie sehen werden, setzen wir unser Herz in dieses Projekt.

Der einzige Weg, wie wir all den neuen Vätern und neuen Müttern mitteilen können, wie viel Aufwand wir machen und wie gut unser Produkt ist, sind die **Rezensionen auf Amazon**.

Ich weiß nicht, ob Sie jemals eine Produktbewertung bei Amazon hinterlassen haben, aber es dauert nur 2 Minuten.

Diese 2 Minuten für mich hätten eine große Bedeutung und würden auch vielen Menschen helfen, das beste Kissen für sich und ihre Kinder zu wählen.

Unter den folgenden zwei Punkten können Sie eine Rezension bei Amazon hinterlassen.

- 1) Greifen Sie im Bereich **“Mein Konto”** und **“Meine Bestellungen”** auf Amazon zu.
- 2) Neben Ihnen **Koala Babycare** Kauf finden Sie: **“Schreibe eine Produktrezension”**.

Wenn Sie sich entscheiden, eine Rezension zu hinterlassen, werde ich unendlich dankbar sein

Ich wünsche Ihr alles Gute für Ihren Baby!

**Liebe Grüße,
Giacomo
Koala Babycare**

